

AED Plus® Trainer2

Schulungszubehör



Vollständig steuerbare Simulation durch einfachen Tastendruck

Der ZOLL® AED Plus Trainer2 ermöglicht es CPR- und Erste-Hilfe-Ausbildern, ihre Kursteilnehmer erleben zu lassen, wie es ist, mit dem AED Plus Leben zu retten. Der Ausbilder kann eines von vier festgelegten Rettungsszenarios auswählen oder die gesamte Rettungsaktion vollständig manuell steuern. Durch eine drahtlose Fernbedienung wird die Steuerung mehrerer AED Plus Trainer2-Geräte ermöglicht.

Mithilfe dieser einfachen Fernbedienung kann der Ausbilder innerhalb von Sekunden ein Rettungsszenario einrichten und auf den AED Plus Trainer2 laden. Um mit der Simulation zu beginnen, drückt der Kursteilnehmer die Ein-Taste an der Trainer2-Einheit. Anschließend bestimmt der Ausbilder, ob bei der nächsten simulierten Herzanalyse ein Schock abgegeben werden soll, ob die Elektroden richtig angebracht sind und unter welchen Bedingungen die Trainer2-Einheit die Ansagen „FESTER DRÜCKEN“ und „HERZDRUCKMASSAGE GUT“ ausgeben soll.

Vorbereitet für die AHA 2010- und die ERC 2010-Leitlinien

Die Trainer2-Software kann mühelos von den AHA 2010- auf die ERC 2010-Leitlinien umgeschaltet werden.

Der AED Plus Trainer2 umfasst alles, was ein Ausbilder benötigt

- AED Plus Trainer2
- Drahtlose Fernbedienung
- Einen Satz AED Plus-CPR-D-padz®-Trainingselektroden
- Einen Satz wiederverwendbare Gelpads für AED Plus-CPR-D-padz-Trainingselektroden
- Vier D-Zellen
- Zwei AA-Zellen
- Bedienungsanleitung

AED Plus Trainer2 Zubehör



Ersatz AED Plus Trainer2-Fernbedienung



AED Plus Trainer-Tragetasche



AED Plus Trainer-Demo-Übungspuppe

AED Plus Trainer2 – Technische Daten

Abmessungen: 13,3 cm (H) x 24,1 cm (B) x 29,2 cm (T)


Gewicht: 2,2 kg

Stromversorgung: 4 D-Zellen (beiliegend) für AED Plus Trainer2 (ausreichend für über 100 Ausbildungsstunden)
2 AA-Zellen (beiliegend) für Fernbedienung
Es ist kein Netzadapter verfügbar – Nur Batteriebetrieb



rettungsszenarios

Mithilfe dieser einfachen Fernbedienung kann der Ausbilder bis zu fünf unterschiedliche Rettungsszenarios einrichten.

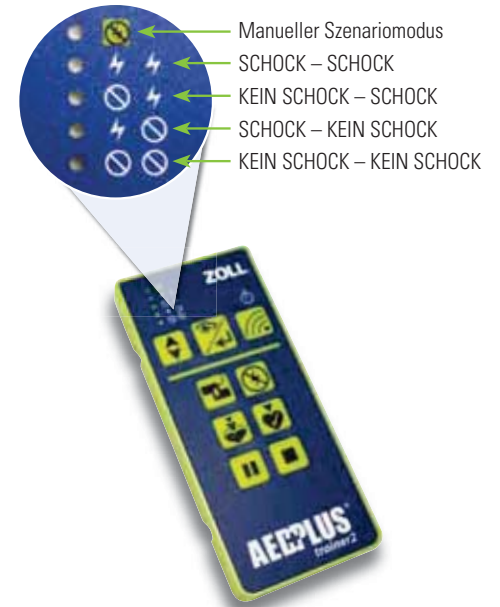

AED Plus Trainer2 – Zubehör

(Ersatzteile müssen separat bestellt werden)



Ersatz-Klebegels für CPR-D-padz-Trainingselektroden



CPR-D-padz-Trainingselektroden



Stat-padz® II-Trainingselektroden (VE: 6)



Pedi-padz® II-Trainingselektroden (VE: 6)

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Deutschland GmbH
Emil-Hoffmann-Str. 13
50996 Köln
Tel: +49 2236 87 87 0
Fax: +49 2236 87 87 77
www.zollmedical.de

Die Adressen und Faxnummern der verschiedenen Niederlassungen sowie andere internationale Niederlassungen finden Sie unter
www.zoll.com/contacts.

Technische Änderungen vorbehalten.

© 2011 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Advancing Resuscitation Today, AED Plus, CPR-D-padz, Pedi-padz, Stat-padz und ZOLL sind eingetragene Marken der ZOLL Medical Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Gedruckt in den USA. 061110 9656-0202-08

ZOLL®